

COM-DEX



Notkunarleiðbeiningar

Janúar 2016




Heyrnar- og talmeínastöð Íslands

COM-DEX Skýringarmyndir

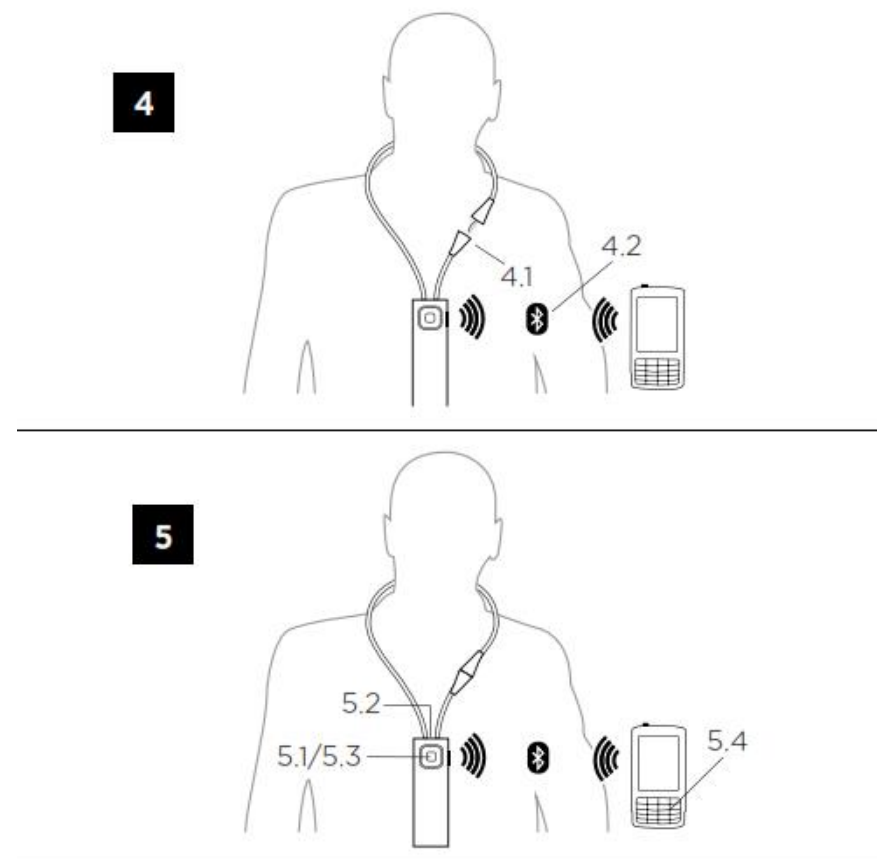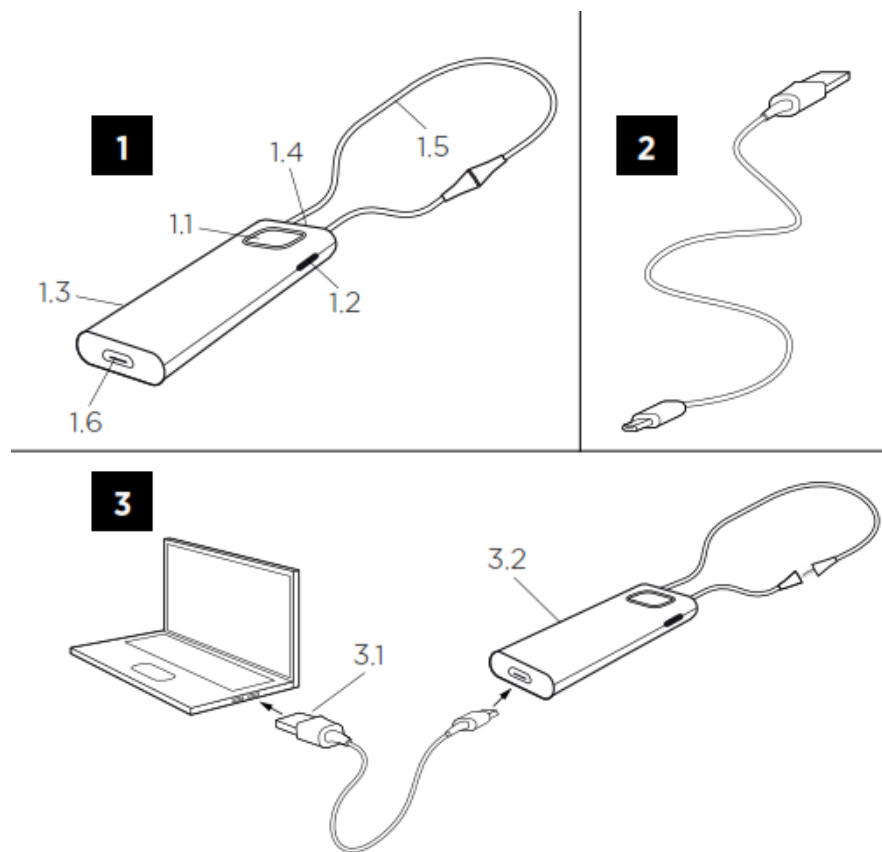


COM-DEX Lýsing tækis

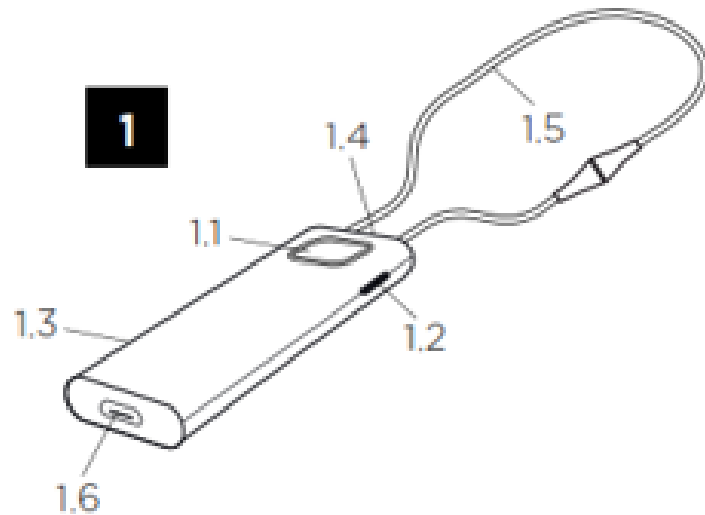

- MYND 1
 - 1.1 Svarhnappur
 - 1.2 Slökkva á hljóðnemunum heyrnartækja
 - 1.3 LED-ljós
 - 1.4 Hljóðnemi
 - 1.5 Hálslykkja
 - 1.6 Micro USB – tengi
- MYND 2: Fylgihlutur
 - USB tengisnúra


COM-DEX HLEÐSLA TÆKISINS

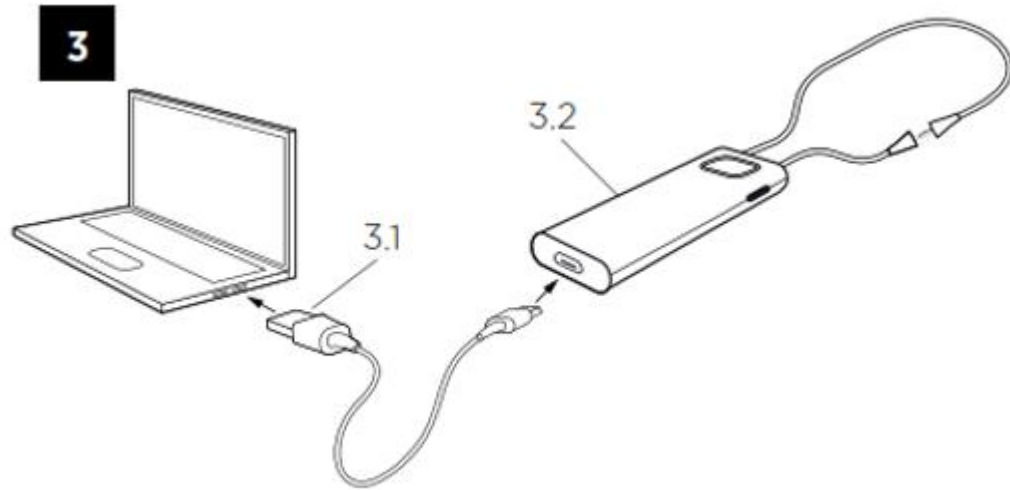

- MYND 3 – Hleðsla
- 3.1 Tengir USB snúru á milli tækis og orkuveitu.
 - Við mælum með því að aftengja hálslykkjurnar á meðan tækið er hlaðið.
- 3.2 Rautt ljós: Tæki hleður sig; Grænt ljós: Tæki er fullhlaðið.
- Ending rafhlöðu:
 - 8 klst streyting, 8 dagar í bið.

COM-DEX NOTKUN

4

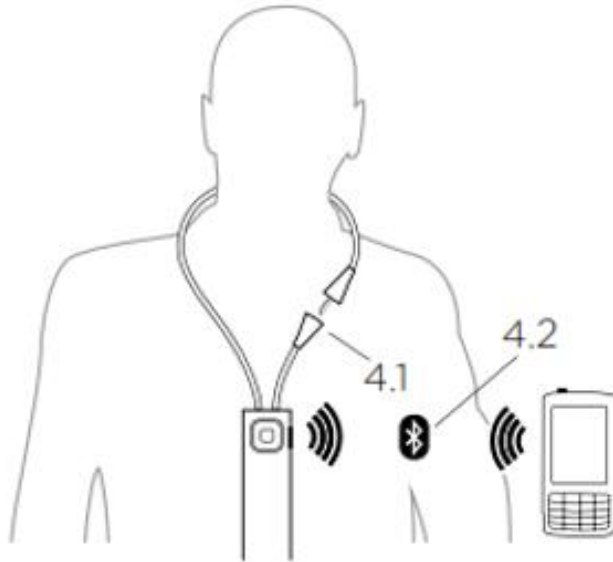

- MYND 4
- 4.1 Tengir halslykkjuhlutana saman. Við það kviknar á tækinu.
 - Halslykkjan virkar sem Á/AF takki, (On-OFF takki).
- 4.2 Párið tækið við farsíma í gegnum Bluetooth tengingu.


Hvernig para ég Com-Dex við farsímann?

- Til að para tækið við farsímann í fyrsta skipti skaltu fylgja eftirfarandi leiðbeiningum:
 1. Tækið og farsíminn þurfa að vera nærri hvort öðru eða innan 1 metra fjarlægðar.
 2. Tengid halslykkjuna, tækið blikkar þá rauðu og bláu ljósi.
 3. Virkjaðu Bluetooth á farsímanum.
 4. Hefjið þörun, fylgið leiðbeiningum sem fylgja farsímanum um Bluetooth tengingar.
 5. Farsíminn mun sýna lista af Bluetooth tækjum (eitt eða fleiri).
 6. Veljið **COM-DEX** af listanum.
- Þegar þörun er lokið mun tenging haldast áfram, jafnvel þó þú slökkvir á tækinu (takir halslykkju úr sambandi).



Hringja símtöl – Svvara símtölum

5

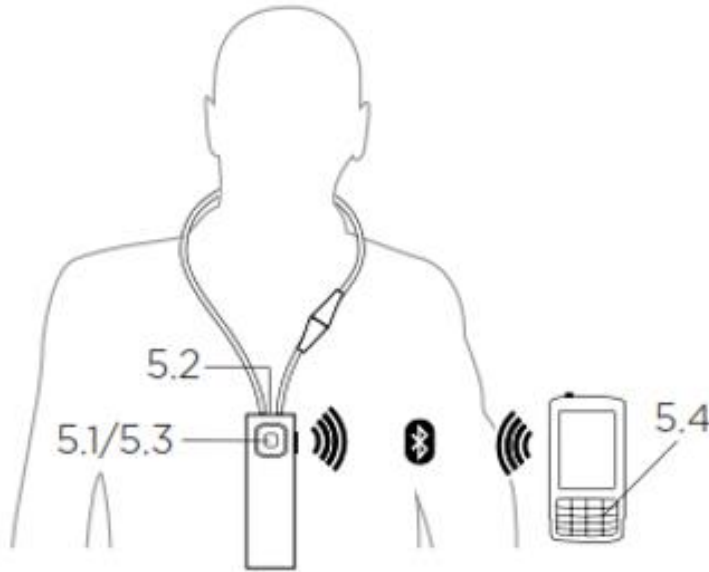

- mynd 5

5.1 Til að svara hringingu: Ýttu á Svarhnappinn.

5.2 Talið í hljóðnemann á tækinu með tækið hangandi um hálsinn.

5.3 Símtali lokið (lagt á) : Ýttu aftur á Svarhnapp.


Athugið: Þú getur líka svarað eða endað símtöl á símanum sjálfum.

Á sumum sínum getur þú þurft að velja COM-DEX sérstaklega því annars gæti hljóðið komið úr hátalara símans.

Úthringingar – Sjá mynd 5

5.4 Að hringja úr símanum. Númer valið og hringt úr síma eins og venjulega.

Hljóðstillingar við notkun

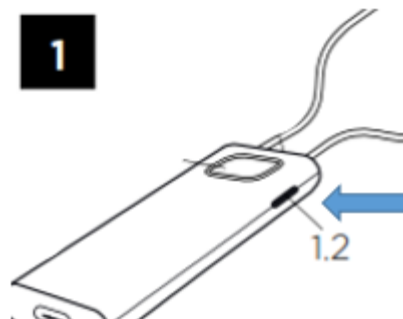

- Hljóðstyrk er stjórnað frá farsímanum.
- Til að útiloka umhverfishljóð getur þú slökkt á hljóðnemunum heyrnartækjanna á meðan á símtali stendur:
 - Ýttu á „Room Off“ eða „Slökkva á hljóðnemunum heyrnartækja“-hnappinn
 - *Sjá mynd 1: Takki 1.2*
- Þú getur hlaðið niður COM-DEX appinu frá App Store eða Google Play. Appið gerir þér kleift að nota snjallsímann sem fjarstýringu fyrir COM-DEX og heyrnartækin.

COM-DEX frá **WIDEX**®

