

Motion 13 Nx

Notendahandbók

DRAFT for verification | 2017-08-31



Innihald

Velkomin(n)	4
Heyrnartækin þín	5
Gerð tækis	5
Lærðu vel á heyrnartækin þín	6
Íhlutir og heiti þeirra	7
Stjórnhnappar	9
Hlustunarkerfi	10
Eiginleikar	10
Rafhlöður	11
Stærð rafhlöðu og ábendingar um meðhöndlun	11
Skipt um rafhlöður	12
Dagleg notkun	13
Kveikt og slökkt á tækjunum	13
Heyrnartækin sett í og fjarlægð	14
Hljóðstyrkur stilltur	16
Hlustunarkerfi breytt	17
Frekari stillingar (valfrjálst)	17
Sérstök hlustunarskilyrði	18
Í símanum	18
Straumspilun hljóðs með iPhone	19
Flugstilling	19
Tónmösavar (valfrjálst)	20

Viðhald og umhirða	21
Heyrnartæki	21
Hlustarstykki, eyrnakrækjur og slöngur	23
Faglegt viðhald	27
Frekari upplýsingar	28
Öryggisupplýsingar	28
Aukabúnaður	28
Tákn sem notuð eru í þessum leiðbeiningum	28
Úrræðaleit	29
Upplýsingar fyrir tiltekin lönd	30
Þjónusta og ábyrgð	31

Velkoma(n)



Takk fyrir að velja heyrnartæki frá okkur sem ferðafélaga í dagsins önn. Eins og ævinlega á við um nýjungar mun það taka þig svölítt tíma að kynnst tækjunum vel.

Þessi handbók, samhliða aðstoð frá heyrnarsérfræðingnum þínum, hjálpar þér að skilja kosti tækjanna og þau auknu lífsgæði sem þau geta veitt þér.

Til að njóta ávinningsins af heyrnartækjunum sem best er mælt með því að nota þau allan daginn á hverjum degi. Það hjálpar þér að venjast tækjunum.



VARÚÐ

Það er afar mikilvægt að lesa þessa notendahandbók og öryggishandbókina vandlega og ítarlega. Fylgdu öllum öryggisupplýsingum til að forðast skemmdir eða slys.

Heyrnartækin þín



Þessi notendahandbók lýsir valfrjálsum eiginleikum sem heyrnartækin þín búa hugsanlega yfir.

Biddu heyrnarsérfræðinginn þinn að benda þér á eiginleikana sem eiga við um heyrnartækin þín.

Gerð tækis

Heyrnartækin þín eru heyrnartæki til nota á bak við eyrað (BTE). Hljóðið berst frá heyrnartækinu inn í eyrað um pípu. Heyrnartækin eru ekki ætluð til notkunar hjá börnum yngri en þriggja ára eða einstaklingum með þroskastig barna yngri en þriggja ára.



Þráðlausu virknin gerir þér kleift að nota háþróaða heyrnarmælieiginleika og ná samstillingu milli beggja heyrnartækja.

Heyrnartækin þín eru með Bluetooth® low energy* tækni sem auðveldar gagnaskipti við snjallsímann þinn og stuðlar að hnökralausri straumspilun hljóðs í gegnum iPhone**-símann þinn.

* Orðmerki og myndmerki Bluetooth eru í eigu Bluetooth SIG, Inc. og hvers kyns notkun löglegs framleiðanda vörunnar á slíkum merkjum er samkvæmt leyfi. Önnur vörumerki og vöruheiti eru í eigu viðkomandi eigenda.

** iPhone er vörumerki Apple Inc., skráð í Bandaríkjunum og öðrum löndum.

Lærðu vel á heyrnartækin þín


Við mælum með því að þú lærir vel á nýju heyrnartækin þín. Leggðu heyrnartækin í lófann og prófaðu að nota stjórnhnappana. Kynntu þér staðsetningu þeirra á tækjunum. Þannig verður auðveldara fyrir þig að þreifa eftir og ýta á stjórnhnappana á meðan þú ert með heyrnartækin í eyrunum.

i

Ef þú átt í erfiðleikum með að ýta á stjórnhnappa heyrnartækjanna á meðan þú ert að nota þau getur þú notað fjarstýringu til að stjórna þeim. Ef þú ert með viðeigandi snjallsímaforrit bjóðast enn fleiri möguleikar á að stjórna tækinu.

Íhlutir og heiti þeirra

Heyrnartækin þín eru annaðhvort fest við eyrnakrækju og sérsniðið hlustarstykki eða við slöngu af staðlaðri gerð (ThinTube) og hlustarstykki af staðlaðri gerð (LifeTip).

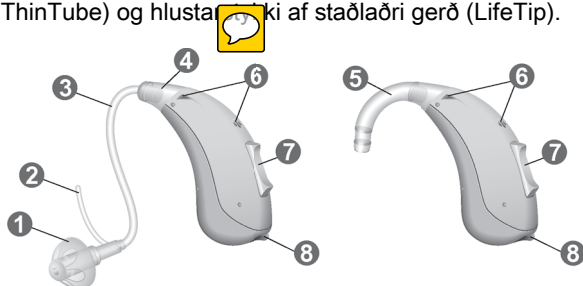

- | | |
|------------------------------------|--|
| ① Hlustarstykki (LifeTip) | ⑤ Eyrnakrækja |
| ② Sveigjanleg festing (valbúnaður) | ⑥ Op hljóð  |
| ③ Slanga (ThinTube) | ⑦ Veltirofi (stjórnhnappur) |
| ④ Millistykki fyrir ThinTube | ⑧ Rafhlöðuhólf (rofi til að kveikja/slökkva) |

Hægt er að nota hlustarstykki af staðlaðri gerð með pípum af staðlaðri gerð og sérsniðin hlustarstykki með eyrnakrækju og slöngu.

Auðvelt er að skipta um hlustarstykki af staðlaðri gerð og hreinsa slönguna. Frekari upplýsingar eru í hlutanum „Viðhald og umhirða“.

Hlustarstykki/slöngur af staðlaðri gerð	Stærð
☐ 	LifeTip opinn eða lokaður
☐ 	LifeTip hálfopinn
☐ 	LifeTip tvöfaldur
☐ ThinTube	


Sérsniðin hlustarstykki

☐ Dæmi:



Stjórnhnappar

Þú getur til dæmis notað veltirofann til að stilla hljóðstyrk eða skipta á milli hlustunarkerfa. Heyrnarsérfræðingurinn þinn hefur forstillt aðgerðir fyrir veltirofann samkvæmt þínum óskum.

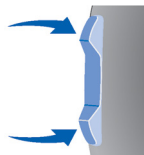

Aðgerðir veltirofa

	H	V
Ýtt niður í stutta stund:		
Skipt á milli hlustunarkerfa	☐	☐
Hljóðstyrkur hækkaður/lækkaður	☐	☐
Styrkur hljóðmerkis fyrir meðhöndlun á eyrnasuði (tinnitus) hækkaður/lækkaður	☐	☐
Ýtt í um tvær sekúndur:		
Skipt á milli hlustunarkerfa	☐	☐
Hljóðstyrkur hækkaður/lækkaður	☐	☐
Styrkur hljóðmerkis fyrir meðhöndlun á eyrnasuði (tinnitus) hækkaður/lækkaður	☐	☐
Ýtt lengur en í þrjár sekúndur:		
Biðstaða/kveikt	☐	☐
Kveikt/slökkt á flugstillingu	☐	☐

V = vinstri, H = hægri



Einnig er hægt að nota fjarstýringu til að skipta um hlustunarkerfi og stilla hljóðstyrkinn eða heyrnartækin. Ef þú ert með snjallsímaforritið okkar bjóðast enn fleiri möguleikar á að stjórna tækinu.

Hlustunarkerfi

1

2

3

4

5

6

Frekari upplýsingar eru í hlutanum „Hlustunarkerfi breytt“.

Eiginleikar

- ☐ **Töf á ræsingu** gerir þér kleift að setja heyrnartækin í eyrun án þess að heyrnartækin gefi frá sér flaut. Frekari upplýsingar eru í hlutanum „Kveikt/slökkt“.
- ☐ Eiginleikinn fyrir **meðhöndlun á eyrnasuði** gefur frá sér hljóð sem beinir athyglinni frá suðinu.

Rafhlöður

Þegar lítil hleðsla er eftir á rafhlöðunni verður hljóðið veikara eða viðvörunarhljóðmerki heyrist. Það ræðst af gerð rafhlöðunnar hvað það líður langur tími þar til skipta þarf um rafhlöðuna.

Stærð rafhlöðu og ábendingar um meðhöndlun

Fáðu upplýsingar um ráðlagðar rafhlöðugerðir hjá heyrnarsérfræðingnum.

Stærð rafhlöðu:

13

- Notaðu alltaf rafhlöður af réttri stærð og gerð fyrir heyrnartækin þín.
- Ef ekki á að nota heyrnartækin í nokkra daga í senn skal fjarlægja rafhlöðurnar úr tækinu.
- Hafðu alltaf aukarafhlöður við höndina.
- Fjarlægðu rafhlöður um leið og þær verða hleðslulausar og fylgdu staðbundnum reglum um förgun á rafhlöðum.

Skipt um rafhlöður

Rafhlaða fjarlægð:

- Opnaðu rafhlöðuhólfið.



- Notaðu segulhorninn til að toga rafhlöðuna úr segulteiginni. Hann er fáanlegur sem aukabúnaður.



Rafhlaða sett í:

- Ef rafhlaðan er með hlífðarlaginu skaltu ekki fjarlægja hana. Þú getur notað hana til að hlaða rafhlöðuna.



- Settu rafhlöðuna í þannig að „+“-tákninn vísi upp (sjá skýringarmynd).



- Lokaðu rafhlöðuhólfinu gætilega. Ef þú finnur fyrir mótstöðu hefurðu ekki sett rafhlöðuna rétt í hólfið.

Reyndu ekki að loka rafhlöðuhólfinu með afli. Hólfið gæti skemmst við það.

Dagleg notkun

Kveikt og slökkt á tækjunum

Þegar þú vilt kveikja eða slökka á heyrnartækjunum getur þú valið um eftirfarandi valkosti.

Með rafhlöðuhólfi:

- Kveikt: Lokaðu rafhlöðuhólfinu.

Sjálfsgefið val á hljóðstyrk og hlustunarkerfi hefur verið stillt.

- Slökkt: Opnaðu rafhlöðuhólfið að þar til lokið stöðvast í fyrsta stoppi.

Með veltirofanum:

- Kveikt eða slökkt: Ýttu á veltirofann og haltu honum niðri í nokkrar sekúndur. Frekari upplýsingar um hvernig stilla á veltirofann eru í hlutanum „Stjórnhnappar“.

Þegar kveikt hefur verið á heyrnartækjunum eru þau stillt á þann hljóðstyrk og hlustunarkerfi sem voru **síðast** notuð.

Þegar heyrnartækin eru í notkun kann að heyrast hljóðmerki sem gefur til kynna að kveikt eða slökkt hafi verið á tækjunum.

Þegar **töf á ræsing** er virk verður nokkurra sekúndna töf á ræingu heyrnartækjanna. Á meðan getur þú stungið heyrnartækjunum inn í eyrun án þess að heyra ónotalegt hátíðniflaut og -hljóð.

Heyrnarsérfræðingurinn þinn getur gert töf á ræingu virka.

Heyrnartækin sett í og fjarlægð

Heyrnartækin þín hafa verið fínstillt fyrir annars vegar hægri og hins vegar vinstra eyrað. Hliðarnar eru merktar hvor í sínum lit:

- rauður merkimiði = hægri eyra
- blár merkimiði = vinstra eyra




Heyrnartæki sett í:

- ▶ Haltu slöngunni þétt upp við hlustarstykkið.
- ▶ Þrýstu hlustarstykkinu varlega inn í hlustina ①.

- ▶ Snúðu því svolítið þar til það situr rétt.

Opnaðu og lokaðu munnum á víxl til að forðast uppsöfnun loftis í hlustinni.

- ▶ Lyftu heyrnartækinu upp og renndu því yfir efri hluta eyrans ②.

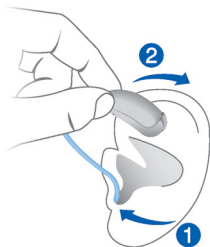

VARÚÐ

Hætta á meiðslum!

- ▶ Settu hlustarstykkið varlega og ekki of djúpt inn í eyrað.

i

- Það getur verið gagnlegt að setja **hægra** heyrnartækið í með **hægri** hendinni og **vinstra** heyrnartækið með **vinstri** hendinni.
- Ef þú lendir í vandræðum með að setja hlustarstykkið í skaltu nota hina höndina til að toga eyrnasnepilinn gætilega niður á við. Við það opnast hlustin og það auðveldar ísetningu hlustarstykkisins.


Sveigjanleg festing (valbúnaður) hjálpar til við að halda hlustarstykkinu tryggilega föstu í eyranu. Sveigjanlega festingin stillt:

- Beygðu festinguna og staðsettu hana gætilega í neðri hluta hlustarinngangsins (sjá mynd).



Heyrnartæki tekið úr:

- ▶ Lyftu heyrnartækinu upp og renndu því yfir efri hluta eyrans ①.
- ▶ Haltu slöngunni þétt upp við hlustarstykkið og togaðu hlustarstykkið gætilega út ②.

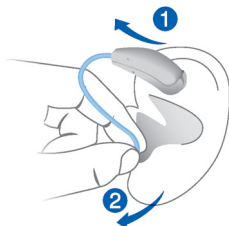

VARÚÐ

Hætta á meiðslum!

- ▶ Örsjaldan kemur fyrir að hlustarstykkið verður eftir í eyranu þegar heyrnartækið er fjarlæggt. Ef þetta gerist skaltu láta heilbrigðisstarfsmann fjarlægja hlustarstykkið.

Hreinsaðu og þurrkaðu heyrnartækin eftir hverja notkun. Frekari upplýsingar eru í hlutanum „Viðhald og umhirða“.

Hljóðstyrkur stilltur

Heyrnartækin þín stilla hljóðstyrkinn sjálfkrafa í samræmi við hlustunarskilyrði.

- ▶ Ef þú kýst frekar handvirka stillingu hljóðstyrks skaltu ýta á veltirofann.

Frekari upplýsingar um hvernig stilla á veltirofann eru í hlutanum „Stjórnhnappar“.

Nota má valfrjálst hljóðmerki til að gefa til kynna breytingar á hljóðstyrk. Þá heyrir hljóðmerki þegar minnsta eða mesta hljóðstyrk hefur verið náð.

Hlustunarkerfi breytt

Heyrnartækin þín stilla hljóðstyrkinn sjálfkrafa í samræmi við hlustunarskilyrði.

Heyrnartækin þín kunna einnig að vera með nokkur hlustunarkerfi sem gera þér kleift að breyta hljóðnum, ef þess gerist þörf. Notaðu valfrjálst hljóðmerki til að gefa til kynna breytingar á hlustunarkerfi.

- Til að skipta um hlustunarkerfi skaltu ýta á veltirofann. Frekari upplýsingar um hvernig stilla á veltirofann eru í hlutanum „Stjórnhnappar“. Listi yfir hlustunarkerfi er í hlutanum „Hlustunarkerfi“.

Frekari stillingar (valfrjálst)

Einnig er hægt að nota stjórnhnappa heyrnartækisins til að breyta öðrum eiginleikum, til dæmis styrk hljóðmerkisins fyrir meðhöndlun á eyrnasuði.

Frekari upplýsingar um hvernig stilla á stjórnhnappana eru í hlutanum „Stjórnhnappar“.

Sérstök hlustunarskilyrði

Í símanum

Þegar þú ert í símanum skaltu halda símtækinu aðeins fyrir ofan eyrað. Heyrnartækið og símtækið þurfa að vera í beinni línu. Snúðu símtækinu aðeins til að það sé ekki alveg yfir eyranu.



Símakerfi

Þú gætir viljað hafa tiltekinn hljóðstyrk þegar þú notar símann. Biddu heyrnarsérfræðinginn þinn að grunnstilla símakerfi.

- Skiptu yfir í símakerfið þegar þú ert í símanum.

Ef símakerfi hefur verið grunnstillt í heyrnartækinu er sú stilling tilgreind í hlutanum „Hlustunarkerfi“.

Straumspilun hljóðs með iPhone

Heyrnartækin þín eru heyrnartæki sem eru **Gerð fyrir iPhone**. Þetta merkir að þú getur tekið á móti símtölum og hlustað á tónlist úr iPhone-símanum þínum beint í gegnum heyrnartækin þín.

Frekari upplýsingar um samhæf iOS-tæki, pörun, straumspilun hljóðs og aðra gagnlega eiginleika færðu hjá heyrnarsérfræðingnum.

Flugstilling

Þar sem notkun Bluetooth-tækni er ekki leyfð (t.d. í sumum flugvélum), er hægt að virkja flugstillinguna. Þá er slökkt tímabundið á Bluetooth í heyrnartækjunum þínum. Heyrnartækin virka samt sem áður án Bluetooth, en bein straumspilun hljóðs er ekki möguleg í fleiri eiginleikum. Þetta er ekki tiltækir.

- Til að kveikja eða slökkva á flugstillingunni skaltu nota snjallsímaforritið eða stjórnhnappa heyrnartækjanna.

Frekari upplýsingar eru í hlutanum „Stjórnhnappar“.

Viðvörðunartónn gefur til kynna þegar kveikt eða slökkt er á flugstillingunni.

Tónmöskvar (valfrjálst)

Sumir símar og almannarými, svo sem leikhús, senda út hljóðmerki (tónlist og talmál) gegnum tónmökva.

Með slíku kerfi geta heyrnartækin tekið við hljóðmerkjum beint – án truflunar frá öðrum umhverfishljóðum.

Yfirleitt eru tónmökvar merktir með tilteknum merkingum.



Ef þú vilt nota þetta kerfi þarf sérstakt rafhlöðuhólf. Það er aðeins fáanlegt sem aukabúnaður í tilteknum gerðum heyrnartækja. Fáðu frekari upplýsingar og ráðleggingar hjá heyrnarsérfræðingnum.

Þegar þú ert á svæði þar sem tónmökvi er til staðar skaltu:

- Skipta yfir á T-spólustillinguna.

Ef T-spólustilling hefur verið grunnstíllt í heyrnartækinu er sú stilling tilgreind í hlutanum „Hlustunarkerfi“.

T-spólustilling og fjarstýring



ATHUGASEMD

Fyrir tæki með þráðlausa tengingu:

Þegar T-spólustillingin er virk getur fjarstýringin valdið þúlshjóði.

- Notaðu fjarstýringuna í meira en 10 cm fjarlægð.

Viðhald og umhirða

Til að forðast skemmdir er mikilvægt að þú hirðir vel um heyrnartækin þín og fylgir nokkrum grunnreglum sem brátt verða hluti af daglegu lífi þínu.

Heyrnartæki

Þurrkun og geymsla

- ▶ Þurrkaðu heyrnartækin yfir nótt.
- ▶ Fáðu upplýsingar um ráðlagðar þurrkvörur hjá heyrnarsérfræðingnum.
- ▶ Ef þú ætlar ekki að nota heyrnartækin í lengri tíma skaltu taka rafhlöðurnar úr og setja tækin í þurrkbúnað með rafhlöðuhólfið opið, til að forðast skemmdir af völdum raka.

Hreinsun

Heyrnartækin þín eru með hlífðarhúð. Ef þau eru ekki hreinsuð reglulega er þó hugsanlegt að tækin skemmist eða þú verðir fyrir meiðslum.

- ▶ Hreinsaðu heyrnartækin með mjúkri, þurri bréfpurrku.
- ▶ Aldrei skal nota rennandi vatn eða sökkva tækjunum í vatn.
- ▶ Aldrei skal beita þrýstingi við hreinsun.
- ▶ Leitaðu ráða hjá heyrnarsérfræðingnum varðandi ráðlagðar hreinsivörur, sérhönnuð hreinsisett eða frekari upplýsingar um hvernig hægt er að halda heyrnartækjunum í sem bestu ástandi.



Hlustarstykki, eyrnakrækjur og slöngur

Eyrnamergur getur safnast fyrir á hlustarstykkjunum. Það kann að skerða hljómgæðin.

- Fyrir heyrnartæki með slöngu af staðlaðri gerð (ThinTube):

Hreinsaðu hlustarstykkinn daglega og slöngurnar eftir þörfum.

Skiptu um hlustarstykkinn og slöngurnar á um það bil þriggja til sex mánaða fresti, eða oftar ef vart verður við sprungur eða aðrar breytingar á þeim.

- Fyrir heyrnartæki með eyrnakrækju:

Hreinsaðu hlustarstykkinn daglega.


Ef vart verður við sprungur eða aðrar breytingar á eyrnakrækjunum skal skipta um þær.

Biddu heyrnarsérfræðinginn þinn að hreinsa slöngurnar eða skipta um hlustarstykki, eins og þörf krefur.

Hlustarstykkinn hreinsuð

- Þegar hlustarstykkinn eru tekin úr skaltu hreinsa þau með mjúkri og þurri bréfpurrku.

Það hindrar að eyrnamergur þorni og storkni á hlustarstykkinu.

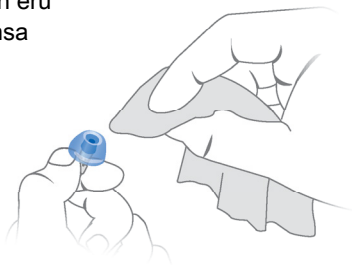


- Aldrei skal nota rennandi vatn eða sökkva hlustarstykkinu í vatn.

Þrif á slöngum af staðlaðri gerð

Aldrei skal nota rennandi vatn eða sökkva slöngunum í vatn.

Slöngur af staðlaðri gerð (ThinTube) má hreinsa með því að nota sérstakan hreinsivír. Fáðu upplýsingar um ráðlagðar gerðir hreinsivíra hjá heyrnarsérfræðingnum.


- Fjarlægðu slönguna og millistykkið með því að skrúfa millistykkið af heyrnartækinu.
- Smeygðu hreinsivírnum varlega inn í millistykkið ❶.
- Ýttu hreinsivírnum alla leið gegnum slönguna ❷.

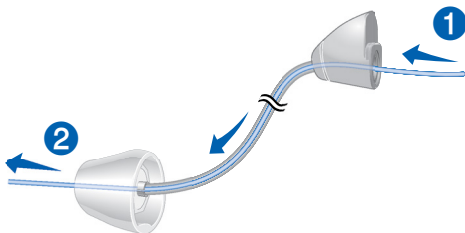

- Strjúktu af eyrnamerg eða óhreini sem losna úr slöngunni.
- Fjarlægðu hreinsivírinn alveg úr slöngunni.
- Festu slönguna og millistykkið aftur við heyrnartækið.

Skipt um hlustarstykki af staðlaðri gerð (LifeTip)

- Togaðu gamla hlustarstykkið út og settu nýtt hlustarstykki í.

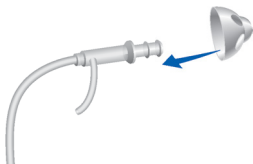

Skipt um slöngur af staðlaðri gerð og millistykki

- Skrúfaðu gömlu slönguna af millistykkinu ①.
- Ef nauðsyn krefur skal skrúfa gamla millistykkið af ②.




- Skrúfaðu nýja millistykkið og slönguna á.

Skipt um eyrnakrækjur

- Skrúfaðu gömlu eyrnakrækjuna af.
- Settu eyrnakrækjuna á þráðinn eins og sýnt er á myndinni ①.
- Skrúfaðu eyrnakrækjuna varlega á með þremur heilum snúningum ②.

Ekki má snúa henni meira til að koma í veg fyrir skemmdir.

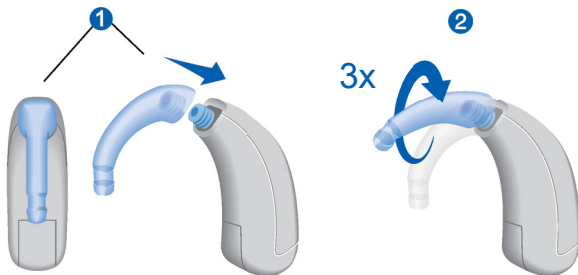

Faglegt viðhald

Heyrnarsérfræðingurinn þinn getur framkvæmt ítarlega og faglega hreinsun og viðhaldsaðgerðir á tækinu.

Heyrnarsérfræðingurinn ætti að skipta um sérsniðin hlustarstykki og mergsíur eftir því sem þörf krefur.

Fáðu sértæk ráð hjá heyrnarsérfræðingnum þínum um tíðni viðhaldsaðgerða og stoðþjónustu.

Frekari upplýsingar

Öryggisupplýsingar

Frekari öryggisupplýsingar eru í öryggishandbókinni sem fylgir tækinu.

Aukabúnaður

Hægt er að nota myControl App til að stjórna heyrnartækjunum með fjarstýringu á þægilegan hátt. Forritið gerir þér einnig kleift að slökkva á hljóðmerkjum, búa til sérstök hljóðsnið og býður upp á margar aðrar aðgerðir.

Einnig er hægt að nota fjarstýringu.

Fáðu frekari upplýsingar og ráðleggingar hjá heyrnarsérfræðingnum.

Tákn sem notuð eru í þessum leiðbeiningum



Vekur athygli á aðstæðum sem gætu leitt til alvarlegra, vægra eða minniháttar slysa á fólki.



Táknar hættu á eignatjóni.



Ráðleggingar og hollráð um æskilegustu meðhöndlun tækisins.



„Gert fyrir iPhone“ merkir að rafrænn aukabúnaður hefur verið hannaður til að tengjast

sérstaklega við iPhone og hefur fengið vottun þróunaraðila um að hann uppfylli kröfur Apple um nothæfi. Apple ber enga ábyrgð á virkni tækisins né því hvort það samræmist öryggisstöðlum og reglugerðum. Hafðu í huga að notkun þessa aukabúnaðar með iPhone kann að hafa áhrif á afköst þráðlauss búnaðar.

Úrræðaleit

Vandamál og hugsanleg úrræði

Hljóðið er dauft

- Auktu hljóðstyrkinn.
 - Skiptu um tómu rafhlöðuna.
 - Hreinsaðu eða skiptu um slönguna og hlustarstykkið.
-

Heyrnartækið gefur frá sér flaut.

- Settu hlustarstykkið aftur í eyrað, þar til það situr tryggilega.
 - Minnkaðu hljóðstyrkinn.
 - Hreinsaðu eða skiptu um hlustarstykkið.
-

Hljóðið er bjagað.

- Minnkaðu hljóðstyrkinn.
 - Skiptu um tómu rafhlöðuna.
 - Hreinsaðu eða skiptu um slönguna og hlustarstykkið.
-

Heyrnartækin gefa frá sér hljóðmerki.

- Skiptu um tómu rafhlöðuna.
-

Vandamál og hugsanleg úrræði

Heyrnartækin virka ekki.

- Kveiktu á heyrnartækjunum.
 - Lokaðu rafhlöðuhólfinu alveg, gætilega.
 - Skiptu um tömu rafhlöðuna.
 - Gakktu úr skugga um að rafhlaðan hafi verið sett rétt í.
 - Töf á ræsingu er virk. Bíddu í nokkrar sekúndur og athugaðu málið svo aftur.
-

Leitaðu ráða hjá heyrnarsérfræðingnum ef þú lendir í frekari vandræðum.

Upplýsingar fyrir tiltekin lönd

Bandaríkin og Kanada

Þessi heyrnartæki með þráðlausri virkni eru vottuð samkvæmt:

- **Bandaríkin** FCC-kenni: SGI-BTE001
- **Kanada**: 267AB-BTE001

Þjónusta og ábyrgð

Raðnúmer

Vinstra tæki:

Hægra tæki:

Þjónustuuppfærslur

1: 4:

2: 5:

3: 6:

Ábyrgð

Dagsetning kaupa:

Ábyrgðartímabil í mánuðum:

Heyrnarsérfræðingurinn þinn



Framleiðandi samkvæmt lögum

Signia GmbH

Henri-Dunant-Strasse 100

91058 Erlangen

Þýskaland

Sími: +49 9131 308 0

Document No. 03340-99T01-8200 IS

Order/Item No. 109 506 49

Master Rev01, 07.2017

© 08.2017, Signia GmbH. All rights reserved



www.signia-hearing.com