



WIDEX

DRY-GO UV Þurrkbox

1. Setjið USB-snúruna í samband við 5V rafmagnstengið og setjið í samband við tengið aftan á þurrkboxinu. Sjá mynd 1
2. Setjið rafmagnstengið í samband við rafmagn í veggnum. Sjá mynd 1.
3. Opnið lokið á Widex DRY-GO UV þurrkboxinu.
4. Fjarlægið rafhlöðurnar úr heyrnartækjunum. Hreinsið hlustarstykkin og setjið þau ásamt heyrnartækjunum, með opna rafhlöðuskúffu, í þurrkboxið. Sjá mynd 2.
5. Til að byrja þurrkferlið með því að ýta á skynjaratakann og lokið. Sjá mynd 2.
 - Þurrkferið hefst og stendur í fjórar klukkustundi.
 - LED ljós merkir að boxið sé í gangi
 - Blikknadi LED ljós merkir að UV-C ljósið er á í fyrstu 4 mínúturnar af þurrktímnum.
 - Í enda þurrktímans mun UV-C ljósið aftur kvikkna í síðustu 4 mínúturnar.
 - Eftir 4 klukkustundur mun þurrkboxið slökkva á sér og LED ljósið slokkna.
6. Opnið lokið og fjarlægið heyrnartækin og hlustarstykkin

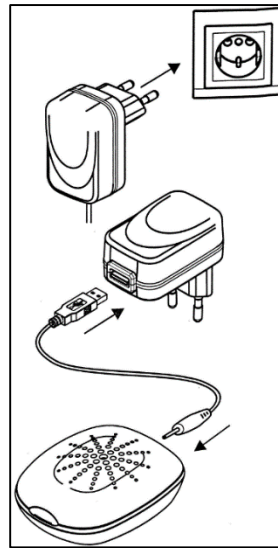

Mynd 1

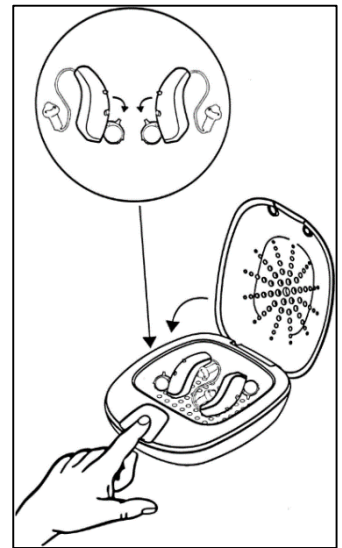

Mynd 2

Umhirða

- Ráðlagt er að þurrka af þurrkboxinu með rökum klút til að hreinsa
- Hægt er að stöðva þurrkferlið með því að ýta á skynjaratakann í 3 sekúndur
- DRY-GO UV er dregur lítið rafmagn en ætti að taka úr sambandi ef ekki á að nota það í lengri tíma
- Þurrkboxið er með öryggi sem slekkur sjálfkrafa á UV-C ljósinu ef lokinu er lyft upp á meðan þurrkferlið er í gangi.

Viðvörðun

- Ekki láta þurrkboxið komast í snertingu við vatn og ekki láta það standa nálægt vaksi eða þess háttar.
- Ekki reyna að taka þurrkboxið í sundur
- Eingöngu nota rafmagnssnúruna sem fylgir með.
- Geymist þar sem börn ná ekki til, þau mega ekki nota þetta sem leikfang.
- Þurrkboxið ætti aðeins vera notað af einstaklingum með nægilega þekkingu á því eða undir eftirliti.
- Ekki horfa á eða koma við UV-C ljósið þegar tækið er í gangi þar sem það getur valdið skaða á augum eða skinni.