



Símasendir með hljóðnema fyrir *lísa*-kerfið

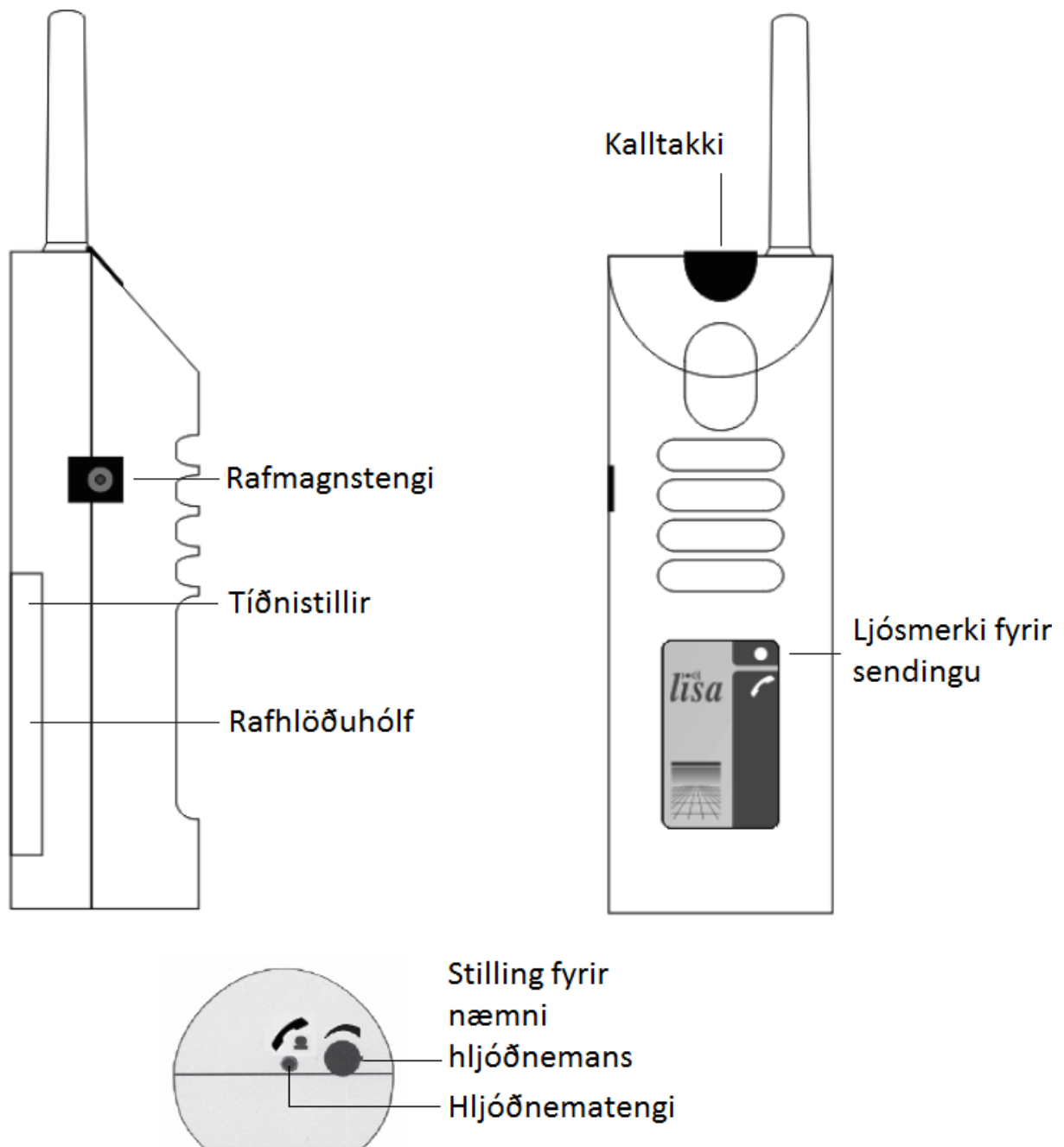

Tenging:

Rafhlaðan, 9V, tengd við rafhlöðutengið og sett í rafhlöðuhólf. Kerfið gæti sent frá sér eitt merki þegar rafhlaðan er tengd.

Undir hefðbundnum kringumstæðum (7 sendingar á dag) er gert ráð fyrir að rafhlaðan endist í ca. 1 ár.

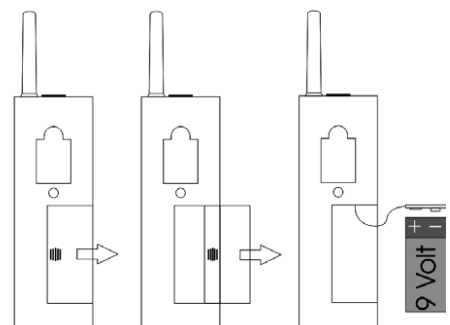

Tíðni:

Passa þarf að sama tíðni sé á sendum og móttökurum í lisa-kerfinu. Frá framleiðanda koma öll tækin stillt á 0. Tíðnistillirinn er staðsettur efst í rafhlöðuhólfinu.




Uppsetning á símasendi:

Hátalarasnúran er tengd í símasendinn og hátalarinn límdur á hljóðútgang símans.

Eftir að hljóðin berast frá símanum er sendingunni haldið áfram í 22 sekúndur.

Gott er að stilla næmni hljóðnemans eftir símanum til að ná hámarks virkni. Síminn er látinn hringja og svo er hækkað í næmninni þar til sendirinn bregst við hljóðinu í símanum.

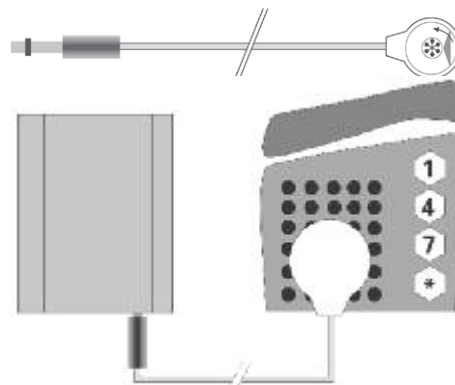

Einstaklingskall

Hægt er að ýta á takka ofan á sendinum til að kalla á einstakling en þá kviknar á ljósinu „einkakall“ á móttakaranum. Einnig er hægt að nota takkann til að setja í gang sendingu til að athuga hvort kerfið virki.

Drægni sendingar

Kerfið er hannað til að taka á móti sendingum úr 80m fjarlægð við bestu aðstæður. Hlutir sem gætu dregið úr drægninni eru t.d. veggir, sjónvörp, tölvur og farsímar.

Staðsetning

Það sem gott er að hafa í huga við staðsetningu á símasendinum:

- Ekki skal staðsetja sendinn nálægt tækjum sem senda frá sér sterk merki því þau gætu truflað, t.d. sjónvörp, tölvur og farsímar.
- Ekki skal staðsetja sendinn ofan á stáli.

Fylgihlutir

Þeir fylgihlutir sem koma með símasendinum eru:

- 1x hátalarasnúra
- 9 V rafhlaða