



Leiðbeiningar fyrir Audéo B R

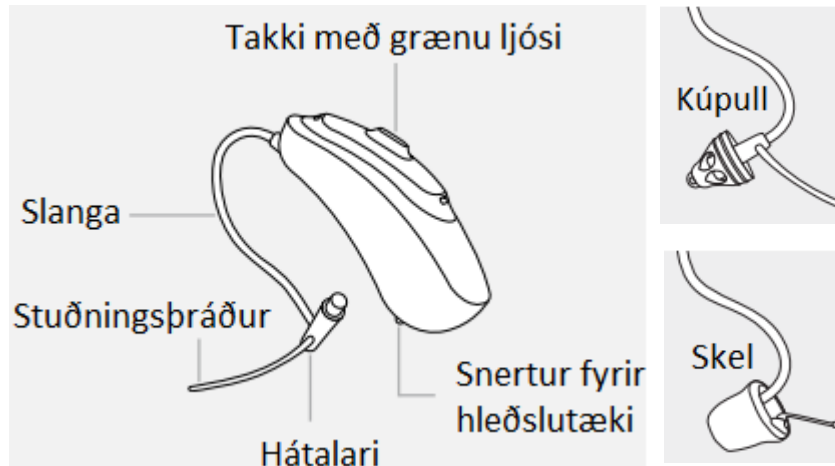

Lita merking er á tækinu og hátalaranum sem segir til um í hvort eyrað tækið á að fara. Sama litamerking er inni á hátalaranum

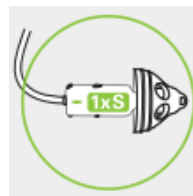


Rautt = hægra eyra

Blátt = vinstra eyra

Kveikja og slökkva

Kveikt og slökkt er á tækinu með því að ýta á takkann og halda inni í 3 sek og þá blikkar ljós.

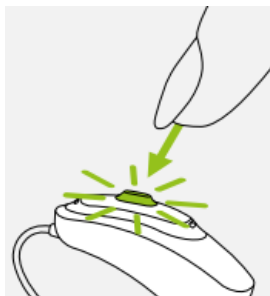

Kveikt = eitt blikk

Slökkt = tvö blikk


Þegar kvikknar á tækinu getur heyrst upphafs stef.

Það líða 6 sek þar til kvikknar alveg á tækinu

Þegar tækið eru í hleðslu blikkar ljósið reglulega.

Þegar tækið er full hlaðið verður ljósið stöðugt.

100% hleðsla	3 klst
80% hleðsla	90 mín
50% hleðsla	60 mín
30% hleðsla	30 mín

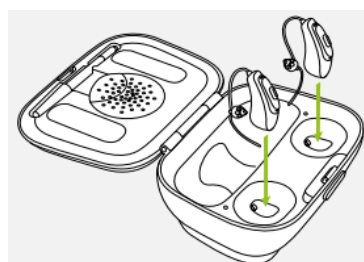

Hægt er að nýta takkann á tækinu sem styrkstilli og kerfisval.

Styrkstillir:

Þegar takinn er notaður sem styrkstillir er hægt að hækka og lækka í tækinu eftir þörfum.

Hægra: Hækkar


Vinstra: Lækkar

Kerfisval

Ef takinn er notaður fyrir kerfisval gefst möguleiki á að skipta á milli sjálfvirks kerfis og einstaklingsbundinna kerfa. Þegar ýtt er á takkann heyrir píp í tækjunum. Fjöldi pípa gefur til kynna hvaða kverfi hefur verið valið.

Fyrsta aukakerfi = eitt píp.

Annað aukakerfi = tvö píp o.s.frv.

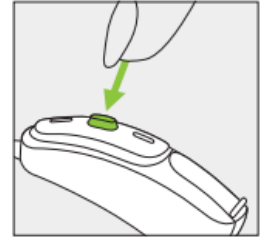


Þegar komið er aftur á sjálfvirkakerfið heyrir upphafsstefið eins og þegar kveikt er á tækinu.

Tækið sett í eyrað

Settu heyrnartækið bak við eyrað. Haltu um slönguna þar sem hún beygir að kúplinum og ýttu kúplinum varlega inn í hlustina. Kúpullinn þarf að fara hæfilega langt inn í eyrað þannig að slangan liggi þétt að höfðinu.

Láttu stuðningsþráðinn (ef hann er til staðar) í botni ytra eyrans.

Ef erfiðlega gengur að koma slöngunni í eyrað getur verið gott að toga í eyrnarsnepilinn með lausu höndinni.

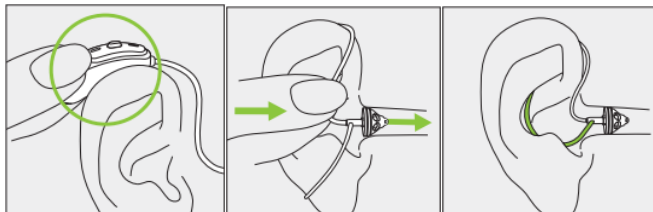**Hreinsun**


Gott er að þurrka af kúplinum eftir notkun dagsins með þurrum klút og amk. einu sinn í viku með rökum klút.

Skipta skal um kúpulinn á amk. 3ja mánaða fresti.

Ef hátalarinn stíflast af eyrnamerg

Eyrnamergur er ein algengasta ástæða þess að heyrnartæki starfar ekki eins og ætlast er til. Við daglega notkun eru líkur á að mergurinn þrýsti sér inn í hátalarann og loki því fyrir eðlilega leið hljóðsins. Skipta þarf reglulega um mergsiuna sem er framan á hátalaranum.

Skipt um mergsíu

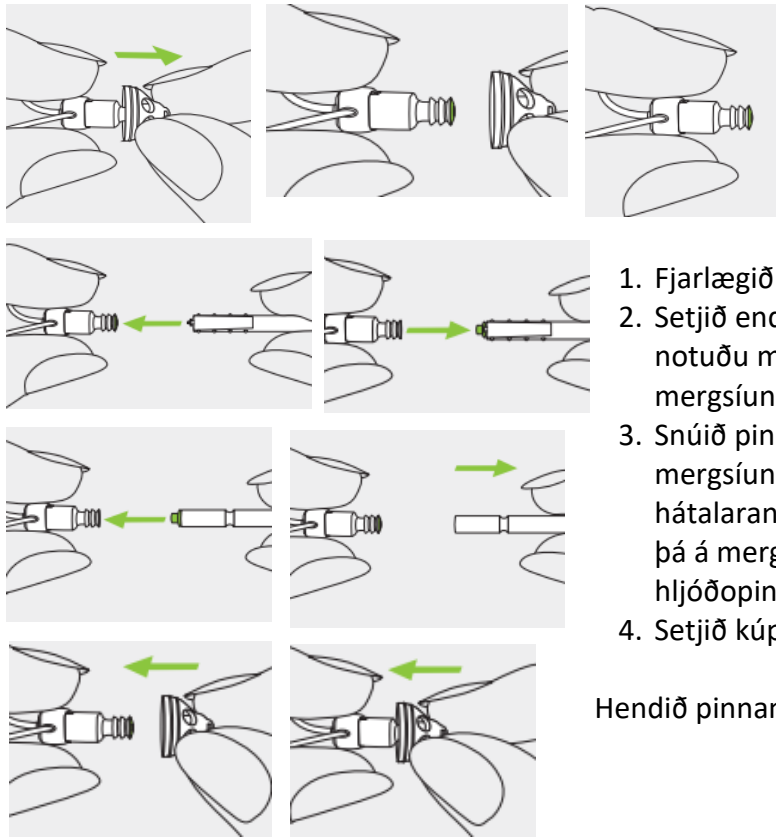

1. Fjarlægið kúpulinn af hátalaranum
2. Setjið endann með krækjunni í notuðu mergsíuna og togið mergsíuna út.
3. Snúið pinnanum við og setjið nýju mergsíuna í hljóðopið á hátalaranum og togið pinnan út og þá á mergsían að sita eftir í hljóðopinun.
4. Setjið kúpulinn aftur á hátalarann.

Hendið pinnanum að notkun lokinni

Símar:

Þegar talað er í síma með bak-við-eyrað heyrnartæki þarf hátalarinn í símtólinu að liggja við hljóðnema heyrnartækisins. Misjafnt er eftir símtækjum hvað styrkurinn er mikill og hversu nákvæmlega símtólið þarf að liggja upp að heyrnartækinu.




Hleðsluboxið




Hleðsluboxið virkar einnig sem geymslubox fyrir heyrnartækin.

Hægt er að setja þurrktöflu í hleðsluboxið sem dregur í sig raka sem gæti leynst í tækjunum

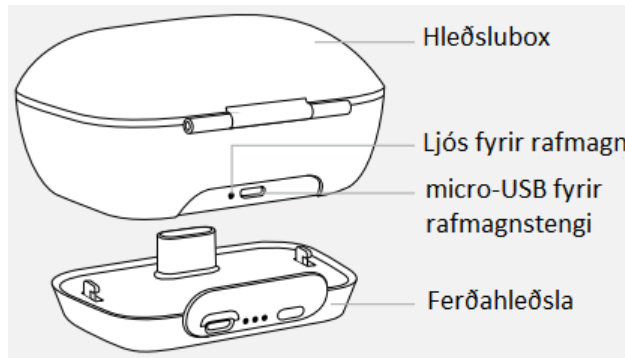

Ferðahleðsluna er hægt að kaupa aukalega, fylgir ekki með.

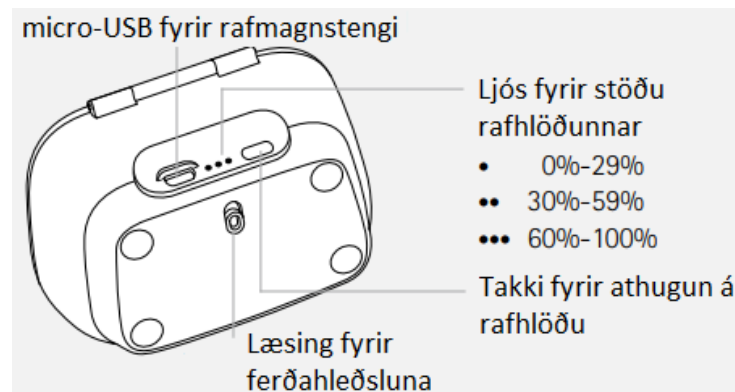

Mikilvægt!

1. Hafið í huga að heyrnartæki koma aldrei í stað fyrir eðlilega heyrn.
2. Hafið rafhlöðuhólfíð opið þegar ekki er verið að nota heyrnartækið þannig að hugsanlegur raki nái að þorna.
3. Ef ekki á að nota heyrnartækið í lengri tíma geymdu það þá í öskjunni sem fylgdi með. Taktið rafhlöðurnar úr því og láttið rafhlöðuhólfíð vera opið. Gangið úr skugga um að tækið sé þurr áður en að öskjunni er lokað.
4. Skýlið heyrnartækinu fyrir raka og hita. Taktu heyrnartækin alltaf af þér áður en þú ferð í sturtu, bað, að synda eða þ.h. Ekki geyma heyrnartækið í heitum glugga eða í bílnum.
5. Það getur verið gott að eiga þurrkbox fyrir heyrnartækið. Heyrnarfræðingur getur ráðlagt þér um þrif á tækinu. Notaðu aldrei sápu eða önnur hreinsiefni á tækið.
6. Hárlakk, andlitskrem og aðrar snyrtivörur geta skemmt heyrnartækið. Taktu tækið af þér á meðan þú setur á þig snyrtivörur.
7. Ef þú finnur fyrir eymslum eða kláða undan tækinu hafðu þá samband við heyrnarfræðing.
8. Ef væl heyrir þegar tækið eru í eyranu getur verið að kúpullinn/skelin sé ekki nægilega langt inni í eyranu. Einnig gæti verið mergur í hlustinni.
9. Ef heyrnartækið virkar ekki þrátt fyrir að þú hafir skipt um rafhlöður skaltu hafa samband við Heyrnar- og talmeinastöðina. Mundu, ef þú ert með fjarstýringu, að koma með hana með ásamt heyrnartækinu.
10. **Gæludýr:** ef gæludýr eru á heimilinu er mjög mikilvæg, þegar ekki er verið að nota heyrnartækið, geyma það alltaf í lokuðu boxi á stað sem dýr ná ekki til. Hundar og kettir sækjast mjög í lyktina sem kemur af tækjum.