



Barnavaki fyrir *lisa*-kerfið

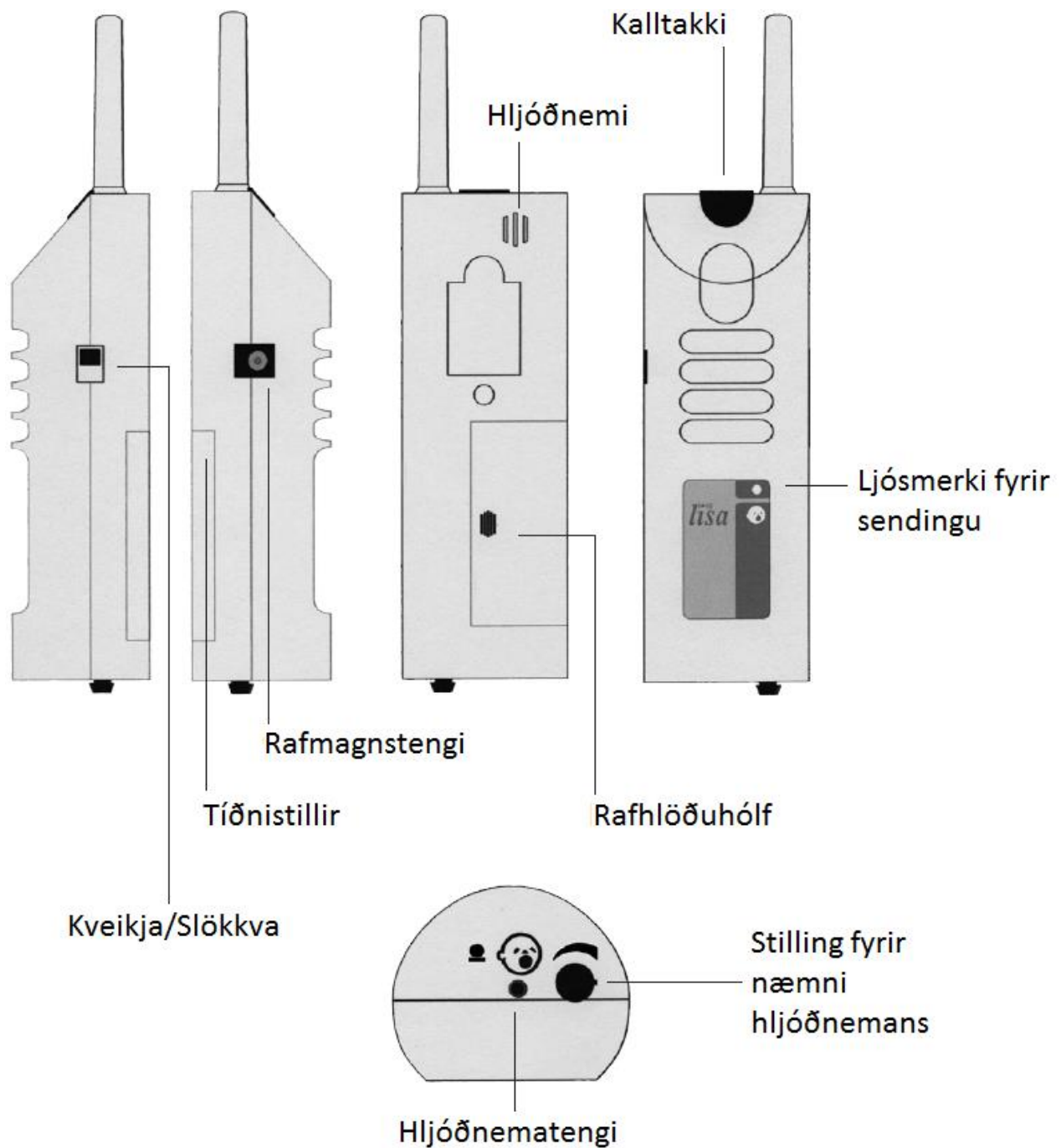

Tenging:

Rafhlaðan, 9V, tengd við rafhlöðutengið og sett í rafhlöðuhólf. Kerfið gæti sent frá sér eitt merki þegar rafhlaðan er tengd.

Undir hefðbundnum kringumstæðum (7 sendingar á dag) er gert ráð fyrir að rafhlaðan endist í ca. 1 ár.

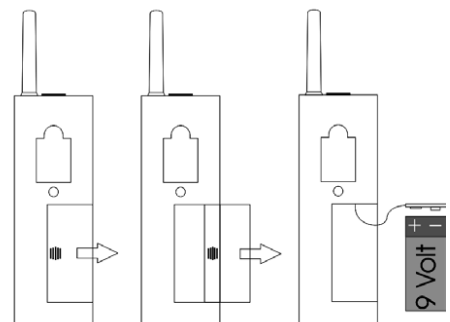

Tíðni:

Passa þarf að sama tíðni sé á sendum og móttökurum í lisa-kerfinu. Frá framleiðanda koma öll tækin stillt á 0. Tíðnistillirinn er staðsettur efst í rafhlöðuhólfinu.



Uppsetning á barnavaka:

Staðsetjið barnavakann nálægt barninu. Í sendinum er innbyggður hljóðnemi sem tekur upp hljóðið frá barninu og sendir það áfram í gegnum kerfið.

Einnig er hægt að fá utanálíggjandi hljóðnema ef ekki er hægt að staðsetja barnavakann nægilega nálægt barninu. Athuga þarf að staðsetja hljóðnemann þar sem barnið nær ekki til.

Eftir að hljóð berst frá barnavakanum heldur sendingin áfram í 22 sekúndur.

Gott er að stilla næmni hljóðnemans til að ná hámarks virkni. Stillinum er snúið rangsælis til að minnka næmnina en réttsælis til að auka næmnina.

Einstaklingskall

Hægt er að ýta á takka ofan á sendinum til að kalla á einstakling en þá kviknar á ljósinu „einkakall“ á móttakaranum. Einnig er hægt að nota takkann til að setja í gang sendingu til að athuga hvort kerfið virki.

Drægni sendingar

Kerfið er hannað til að taka á móti sendingum úr 80m fjarlægð við bestu aðstæður. Hlutir sem gætu dregið úr drægninni eru t.d. veggir, sjónvörp, tölvur og farsímar.

Staðsetning

Það sem gott er að hafa í huga við staðsetningu á barnavakanum:

- Ekki skal staðsetja sendinn nálægt tækjum sem senda frá sér sterk merki því þau gætu truflað, t.d. sjónvörp, tölvur og farsímar.
- Ekki skal staðsetja sendinn ofan á stáli.

Fylgihlutir

Þeir fylgihlutir sem koma með barnavaknum eru:

- 1x hátalarasnúra
- 9 V rafhlaða
- 9 V rafmagnstengi
- Standur