

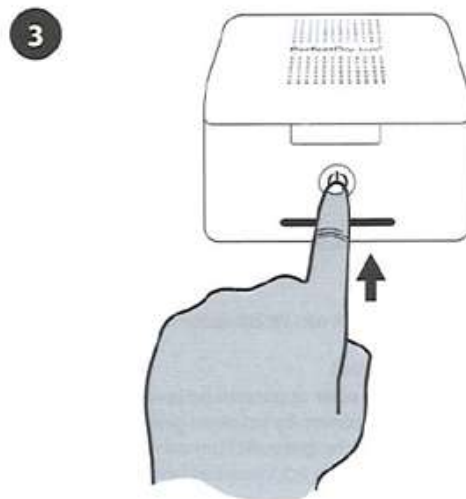


Leiðbeiningar – PerfectDry Lux þurrktæki

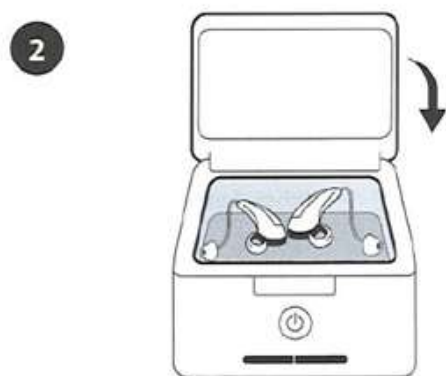

➔ Ýta 1 sinni = Hraðaðgerð
30 mín

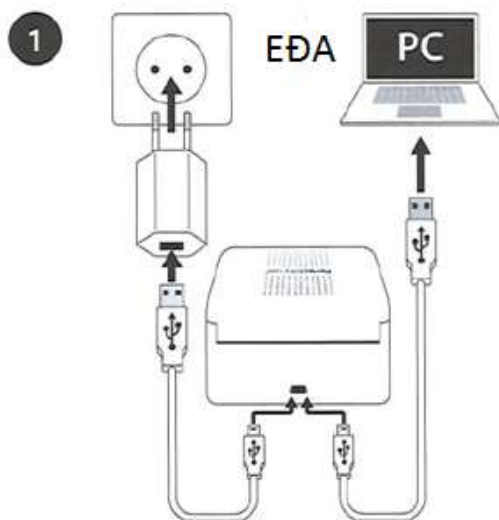

➔ Ýta 2svar = Full aðgerð
1klst og 30 mín



1. Tengið USB snúruna við tengi á bakhlið þurrktækisins. Setjið síðan snúruna í samband við tölvu eða beint í rafmagnsdós ef notaður er straumbreytirinn sem fylgir. Ljós kviknar sem sýnir að þurrktækið sé tengt og tilbúið til notkunar. Ef þurrktækið er ekki sett í gang innan einar mínútu þá slekkur tækið aftur á sér.
2. Setjið heyrnartækin í tækið. Opnið rafhlöðuhólfið á heyrnartækjunum og fjarlægið rafhlöðuna, hafið hólfið opið. Lokið síðan þurrktækinu.
3. Aðgerð valin:
Þegar þrýst er einu sinni á hnappinn er valin hraðaðgerð sem tekur 30 mínútur og þá lýsir eitt ljós.
Þegar þrýst er tvisvar á hnappinn er velinn full hreinsi- og þurrkaðgerð sem tekur um 1 ½ klukkustund og þá lýsa tvö ljós.
Tækið sótthreinsar heyrnartækin með útfjólubláu ljósi.

Tækið slekkur sjálfvirktt á sér að lokinni aðgerð. Hægt er að stöðva aðgerð með því að opna lokið.