




InfraLight LR Set búnaður til að nota við sjónvarp og útvarp. Búnaðurinn samanstendur af sendi sem er tengdur við sjónvarpið, fm-lykkja sem höfð er um hálsinn, tveimur rafhlöðum, og hleðslutæki. Hljóð er sent beint í heyrnartækin sem þarf að stilla á T eða MT.

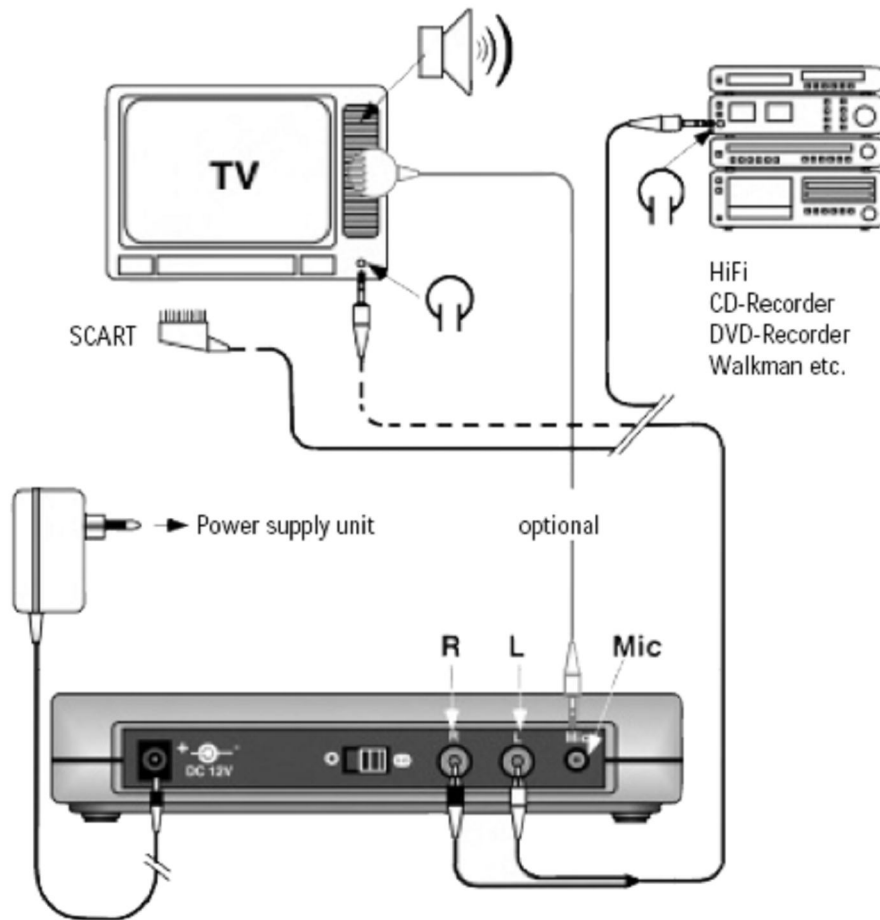

Þegar rafhlaðan fyrir heyrnartólin / fm-lyykkjan er hlaðin í fyrsta sinn þarf að hlaða hana í 14 klukkustundir. Notið einungis rafhlöður sem fylgja með tækinu. Í pakkanum eru tvær rafhlöður og eitt sýnishorn.

Athugið að ekkert skerði línuna milli móttakarans og sendisins.

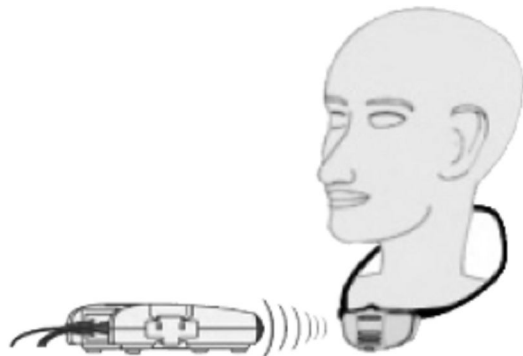


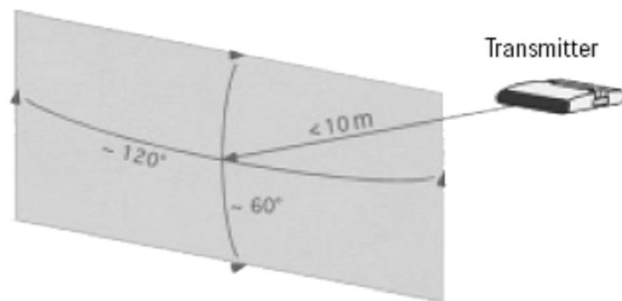

Myndin sýnir fjarlægðina sem búnaðurinn nær yfir. Hljóðið dettur út ef farið er lengra en 10 metra frá sendinum.


Mónó – steríó takki

Ef sendirinn er stilltur á steríó en er tengdur mónó tengingu heyrir aðeins öðru megin, ef þetta gerist stillið á mónó.

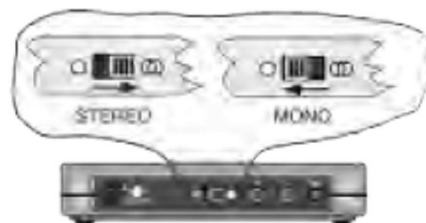

Notkun

Kveiktu á móttakaranum og settu heyrnartækið á T eða MT. Nú er hægt að stilla hljóðið með styrkstillinum frá 1 (lægsta) upp í 5 (hæsta).

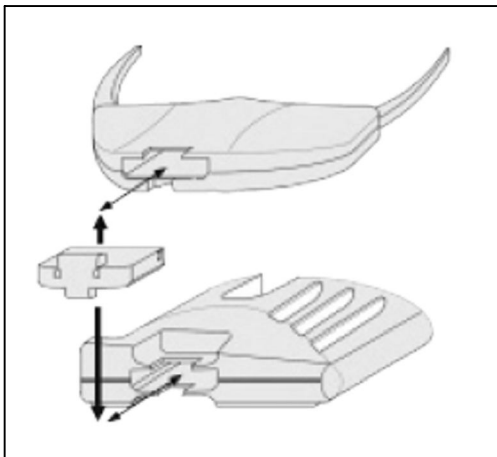

Skipt um rafhlöðu

Ef truflanir verða á hljóðinu í móttakaranum þarf að skipta um rafhlöðu eða hlaða fm-lykkjuna með rafhlöðunni í vöggunni.

ATHUGIÐ: Ekki þvinga rafhlöðuna í hleðslutækið eða móttakarann.