


RadioLight LR Set búnaður til að nota við sjónvarp og útvarp. Búnaðurinn samanstendur af sendi sem er tengdur við sjónvarpið, fm-lykkja (móttakari sem hafður er um hálsinn), tveimur rafhlöðum, og hleðslutæki. Hljóð er sent beint í heyrnartækin, sem þarf að stilla á tónmöskvastillingu, T eða MT.

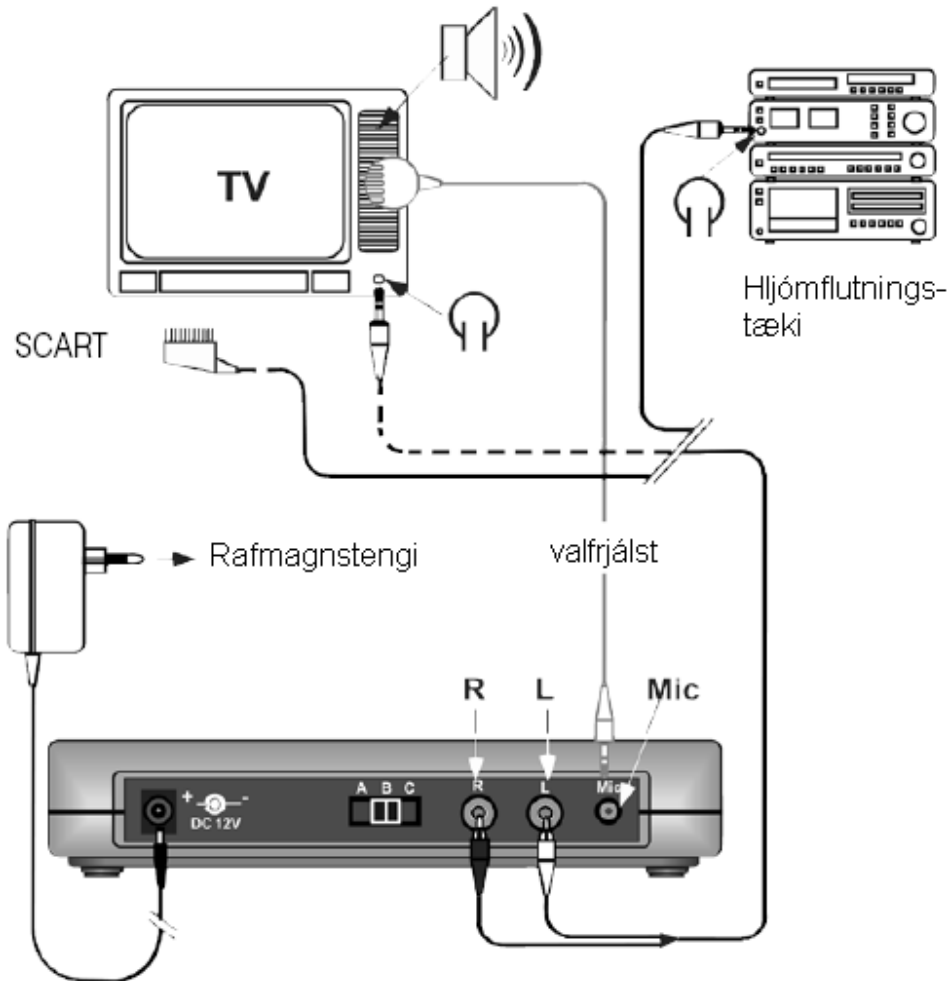

Ef rauða og hvíta tengið er notað, eingöngu, þarf að athuga að það sé sett í samband aftan í sjónvarpið, sem er fyrir hljóð út.


(Yfirleitt eru tengin sem eru að frama eða á hlið fyrir hljóð inn í sjónvarpið)


Þegar rafhlaðan fyrir FM-lykkjuna er hlaðin í fyrsta sinn þarf að hlaða hana í 14 klukkustundir. Notið einungis rafhlöður sem fylgja með tækinu. Í pakkanum eru tvær rafhlöður og eitt sýnishorn.

FM-lykkjan á ávallt að vera á OFF þegar hún er í hleðslu.

Hleðsluljósið er rautt þegar rafhlaða er í hleðslu en verður grænt þegar rafhlaðan er full hlaðin.

Biðstöðuljósið verður blátt þegar sendirinn hefur náð tengingu við hljóðgjafann.

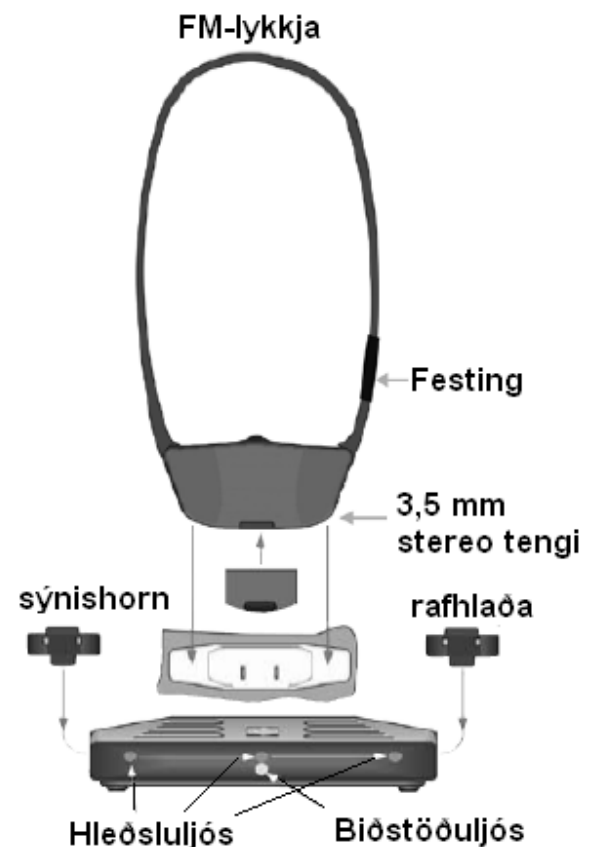


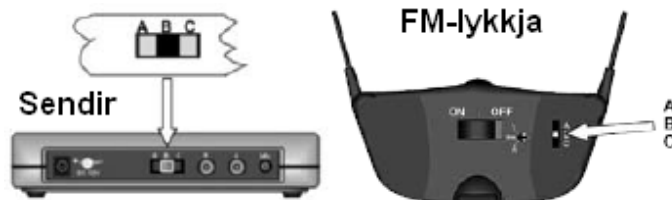


Hægt er að velja um 3 mismunandi tíðnir á sendinum. Ef ein tíðni, td. A, er trufluð er hægt að prufa annað hvort B eða C í staðinn.

ATH. Ef sendirinn er silltur á aðra tíðni þarf einnig að stilla FM-lykkjuna. Sendirinn og FM-lykkjan þurfa ávallt að vera á sömu tíðni.

Notkun

Kveiktu á FM-lykkjunni (ON) og stilltu heymartækið á T eða MT. Hægt að stilla hljóðið frá FM-lykkjunni með styrkstillinum, frá 1 (lægsta) upp í 5 (hæsta).

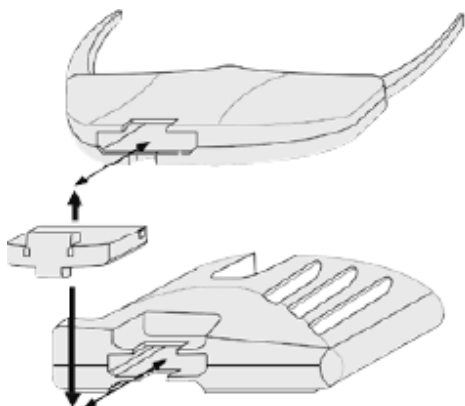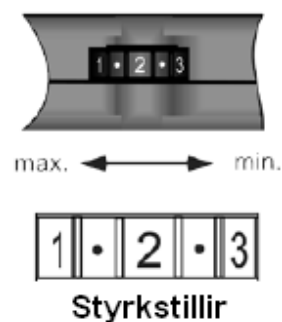

Skipt um rafhlöðu

Ef truflanir verða á hljóðinu í FM-lykkjunni þarf að skipta um rafhlöðu eða hlaða FM-lykkjuna með rafhlöðunni í sendinum.

ATHUGIÐ: Ekki þvinga rafhlöðuna í sendinn eða FM-lykkjuna.